

設定変更

本器は「メロディー音量」、「ブザー音量(クリック音・警告音)」の設定変更が可能です。なお、設定された内容は電源スイッチを「切」にしても記憶されています。
※設定前にタイマー・スチーム・赤外線がOFFになっていることを確認してください。

設定項目

3項目の変更が可能。

設定変更ができるのは、以下の3項目です。

- **メロディー音量** —— タイマー設定時間の経過を知らせるメロディー音。
- **ブザー音量** ——
 - 〈クリック音〉スイッチを押したときに鳴るクリック音。
 - 〈警告音〉誤った操作をした場合の警告音。

※ご購入時の設定は小音になっています。


使用するスイッチ

4種類のスイッチを使用。

設定変更には通常使用するタイマーの4種類のスイッチを使用します。

- 「スタート/ストップ」
- 「1分スイッチ」
- 「2分スイッチ」
- 「3分スイッチ」

使用するスイッチ

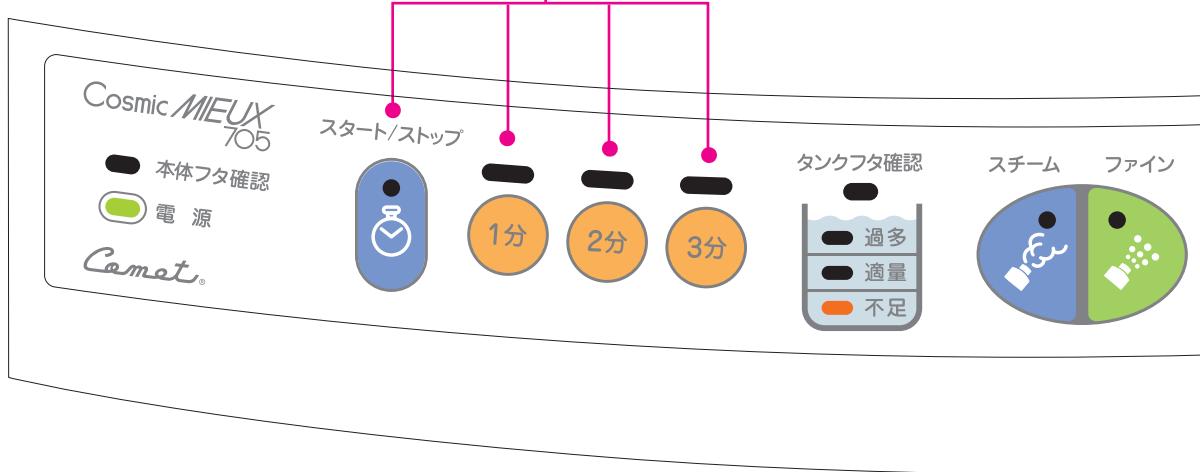


設定変更

ブザー音量


1 「スタート/ストップ」スイッチと「2分」「3分」スイッチを押す。

- ①「スタート/ストップスイッチ」を押します。
- ②「スタート/ストップスイッチ」を押した状態で、「2分」「3分」のスイッチを同時に1~2秒間押します。
〈「スタート/ストップ」「1分」「2分」「3分」のランプ点滅〉
※「スタート/ストップスイッチ」「2分」「3分」の3つのスイッチを同時に押さないでください。

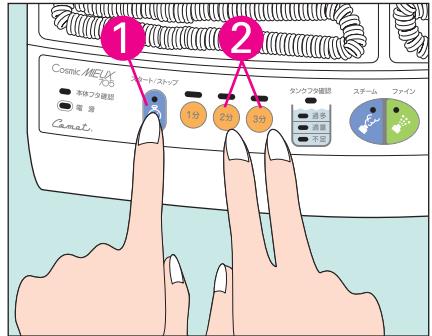


2 「2分」スイッチを押す。

- 「スタート/ストップ」「1分」「2分」「3分」のランプの点滅を確認したら、「2分」スイッチを押します。
〈現在設定されている音量のランプ点滅〉

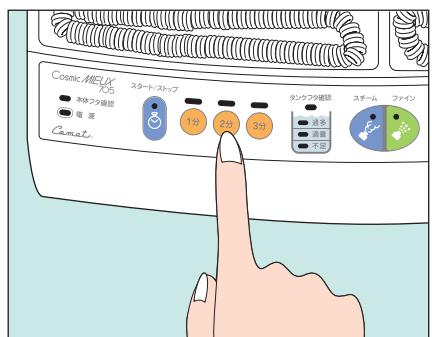


3 お好みの音量のスイッチを押す。

- 下記の3つの音量の中から、お好みの音量のスイッチを押します。
●無音…「1分」 ●小音…「2分」 ●大音…「3分」
〈変更された音量のブザー音が鳴り、設定したランプ点滅〉

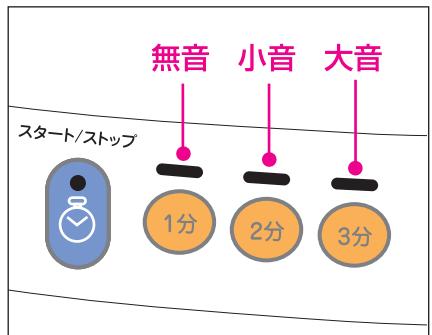

4 設定を決定する。


変更された音量でよろしければ、「スタート/ストップ」スイッチを押します。設定が決定され終了です。

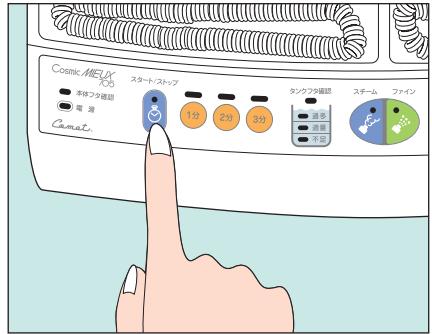

メロディー音量


1 「スタート/ストップ」スイッチと「2分」「3分」スイッチを押す。

- ①「スタート/ストップスイッチ」を押します。
- ②「スタート/ストップスイッチ」を押した状態で、「2分」「3分」のスイッチを同時に1~2秒間押します。
(「スタート/ストップ」「1分」「2分」「3分」のランプ点滅)
※「スタート/ストップスイッチ」「2分」「3分」の3つのスイッチを同時に押さないでください。

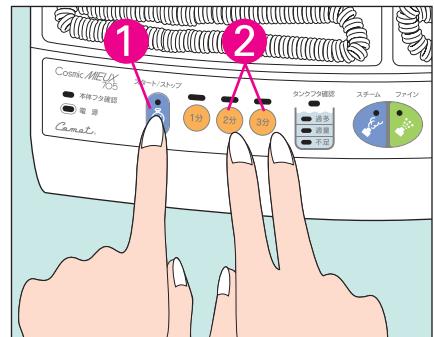


2 「1分」スイッチを押す。

「スタート/ストップ」「2分」「3分」のランプの点滅を確認したら、
「1分」スイッチを押します。
(現在設定されている音量のランプ点滅)

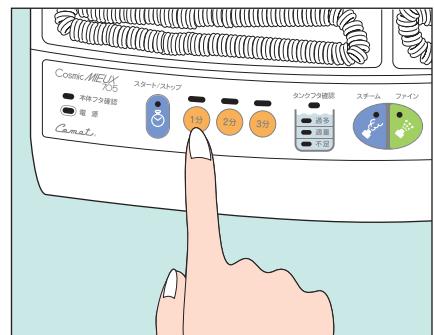

3 お好みの音量のスイッチを押す。

下記の3つの音量の中から、お好みの音量のスイッチを押します。
●無音…「1分」 ●小音…「2分」 ●大音…「3分」
(変更された音量のメロディー音が鳴り、設定したランプ点滅)

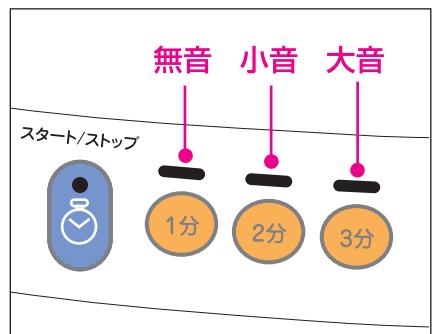

4 設定を決定する。

変更された音量でよろしければ、「スタート/ストップ」スイッチを押します。設定が決定され終了です。

